

ProCare

Dent 10 MA



Reinigungsmittel

Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, mit Tensiden. Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inklusive Übertragungsinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

ProCare Dent 10 MA unterstützt die Entfernung organischer Anschmutzungen wie z. B. Blut und Speichel und verhindert deren Redeposition. Es wird empfohlen, Reste von Kompositen, Zement und Abdruckmasse vor dem Aushärten grob zu entfernen.


Qualitätsmerkmal

ProCare Dent 10 MA erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte. **CE**

Produkteigenschaften

- Hohe Materialschonung
- Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen
- Enthält Alkalien und Tenside.

ProCare Dent 10 MA ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

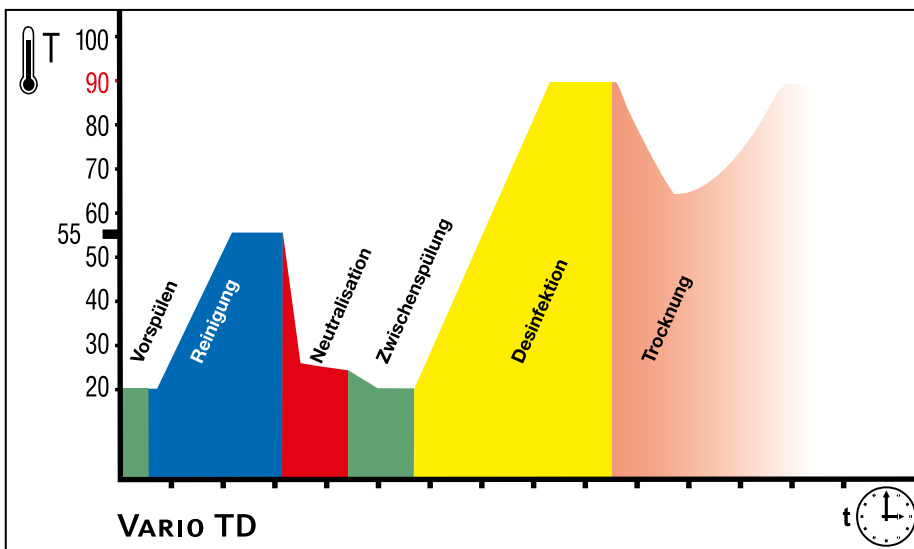

Verfahrensablauf varioTD

- Vorspülen mit kaltem Wasser, um grobe Verschmutzungen (z.B. Blut) zu beseitigen
- Reinigen mit ProCare Dent 10 MA bei 55°C (Dosiertemperatur 40°C); für eine enzymatische Reinigung müsste eine entsprechende Programmänderung vorgenommen werden
- Neutralisieren
- Zwischenspülen mit kaltem Wasser
- Thermische Desinfektion bei 93°C/5 min Haltezeit und Nachspülen
- Trocknen

Anwendung und Dosierung

Miele ProCare Dent 10 MA ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Anwendungskonzentration:
 - Mildalkalische/tensidische Reinigung: 3 ml/l bei einer Reinigungszeit < 10 Minuten, Reinigungstemperatur 55°C
 - Enzymatische Reinigung: 5 ml/l bei einer Reinigungszeit > 10 Minuten, Reinigungstemperatur 45°C - 50°C
- Programmwahl varioTD

Die Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen. Beim Einsatz in Miele Professional Thermo-Desinfektoren ist dies bei korrekter Anwendung (z.B. korrektes Einsortieren des Spülgutes) durch das varioTD Programm gegeben. Eine Verifizierung erfolgt durch die Messung der Leitwert-erhöhung im Schlusspülgang im Rahmen der Inbetriebnahme oder Routinewartung des Thermo-Desinfektors. Es wird der Einsatz von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen, um Beläge und Wasserflecken zu vermeiden und eloxiertes Aluminium zu schützen.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Für einen Produktwechsel ist der Miele Kundendienst anzufordern.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Thermo-Desinfektoren sind zu beachten.

ProCare

Dent 10 MA




Technische Daten

- Dichte (20°C): ca. 1,1 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20°C) 3 bis 5 ml/l: ca. 10,6 bis 10,7

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gem. EG-Detergenzienverordnung 648/2004

- < 5 % nichtionische und anionische Tenside
- außerdem Enzyme

Lagerhinweise

- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0°C bis 25°C
- Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre verwendbar
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 

Gefahren- und Sicherheitshinweise

- Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.miele-professional.de verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Dent 10 MA	5 l Kanister	9 313 850
Kanisterschlüssel	für 5 l und 20 l Kanister	9 066 810

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 666
www.miele-professional.de

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Importeur für die Schweiz:
Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach



Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de